

WANCORO(ワンコロ)

取扱説明書

ご使用になる前に

この取扱説明書を全てお読み頂きましたうえ
正しくお使いください

この度は当社製品をお買い上げ頂き、有難うございます。
この取扱説明書は、いつでもご覧いただける様、身近に保管して下さい。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくために

※ここに示した項目は製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる飼い主様や愛犬自身、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをした際に想定される内容について「警告」「注意」の区分でご説明しております。全て安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、愛犬が死亡または重症、後遺症を負う危険性が切迫して生じる可能性を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、愛犬が怪我または体の一部に障害を負う可能性がある事を示しています。



この記号  は「してはいけない」禁止を示しています。
必ずお守りください。

使い方解説動画もご用意しております。



よろしければご利用ください。

◀QRコードよりアクセス

※リンク先は

WANCORO 公式 HP です



使用可能な犬の条件について

①体高：200mm～330mm以内の犬



レギュラーパイプ 体高 200～280mm	ミニチュアダックスフンド、マルチーズ、シーズー、パピヨン、パグ、チワワ、ポメラニアン、ミニチュアピンシャーなどの小型犬、小型犬同士のミックス犬
ロングパイプ 体高 281～330mm	トイプードル、ミニチュアシュナウザー、ノーフォークテリア、ペキニーズ、キャバリア、ピジョンフリーゼなどの小型犬、小型犬同士のミックス犬

●犬種例はあくまで目安です。必ず体高に合わせてパイプを選択してください。



●体高200mm以下、330mm以上の犬には使用しないでください。
バランスが取れなかったり負荷がかかったりして犬自身の負担になる可能性があります。

②体重：3kg～8kg以内の犬



●3kg以下の犬は本商品の重さ（1kg前後）が犬自身の体重と比較して負荷が大きいと考えられますので体高の基準を満たしていても使用をしないでください。

●8kg以上の犬の使用は本商品が破損などなく負荷に耐えられる保証ができない為、体高の基準を満たしていても使用しないで下さい。


この製品について

本品は医療器具ではありません。愛犬が必ずしも歩けるようになることを保証するものではありません。

愛犬の歩行を補助するための歩行サポート車椅子です。

本商品を使用することにより、「歩行が不自由なワンちゃんがまた再び飼い主様と一緒に楽しく散歩に行けるようになることを願って」開発された商品です。


各部の名称と機能（全体）

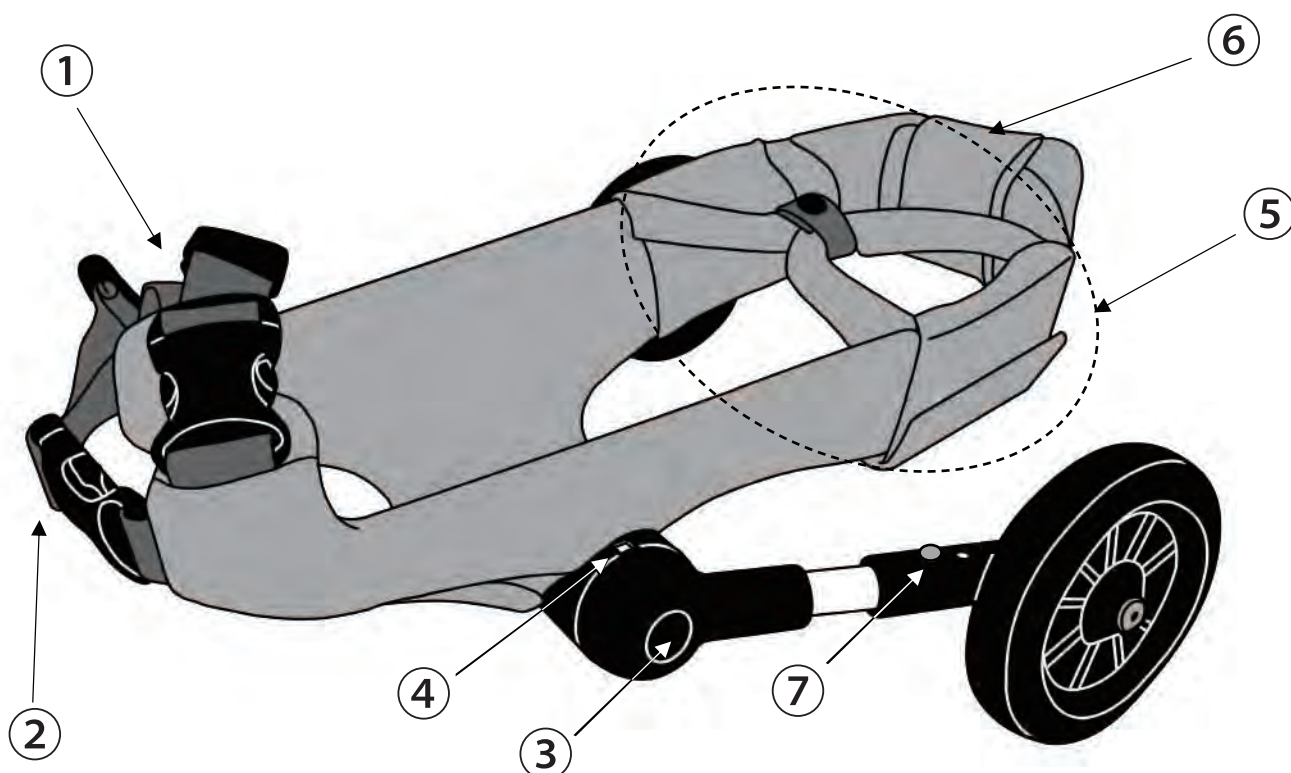

	名称	機能
①	首ベルト	上部の長さ調節と固定用のベルト
②	前ベルト	前部の長さ調節と固定用のベルト
③	角度調節ボタン	押すとロックが解除されて角度が変えられる
④	角度確認窓	角度の段階を確認するための窓
⑤	後ろ脚受け部	犬の後ろ脚を支える部分
⑥	固定帯	本体形状を固定する帯
⑦	パイプ長さ調節ボタン	押すとロックが解除されてパイプの長さが変えられる

各部の名称


＜本体＞

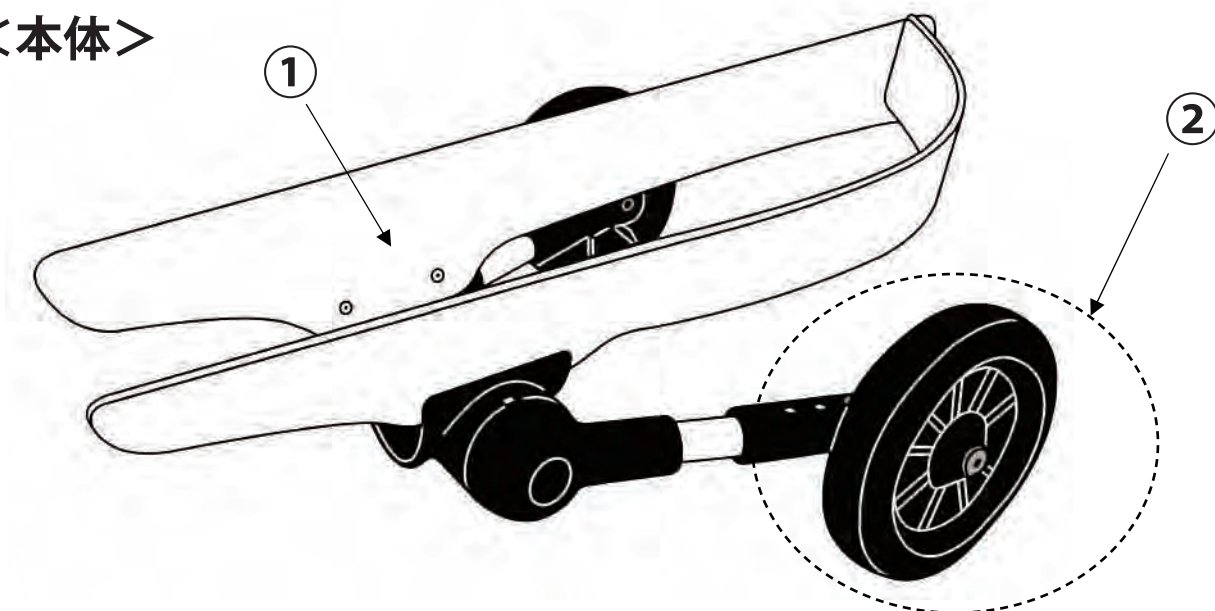


①	サポートプレート
②	タイヤユニット

各部の名称

＜布地カバー＞

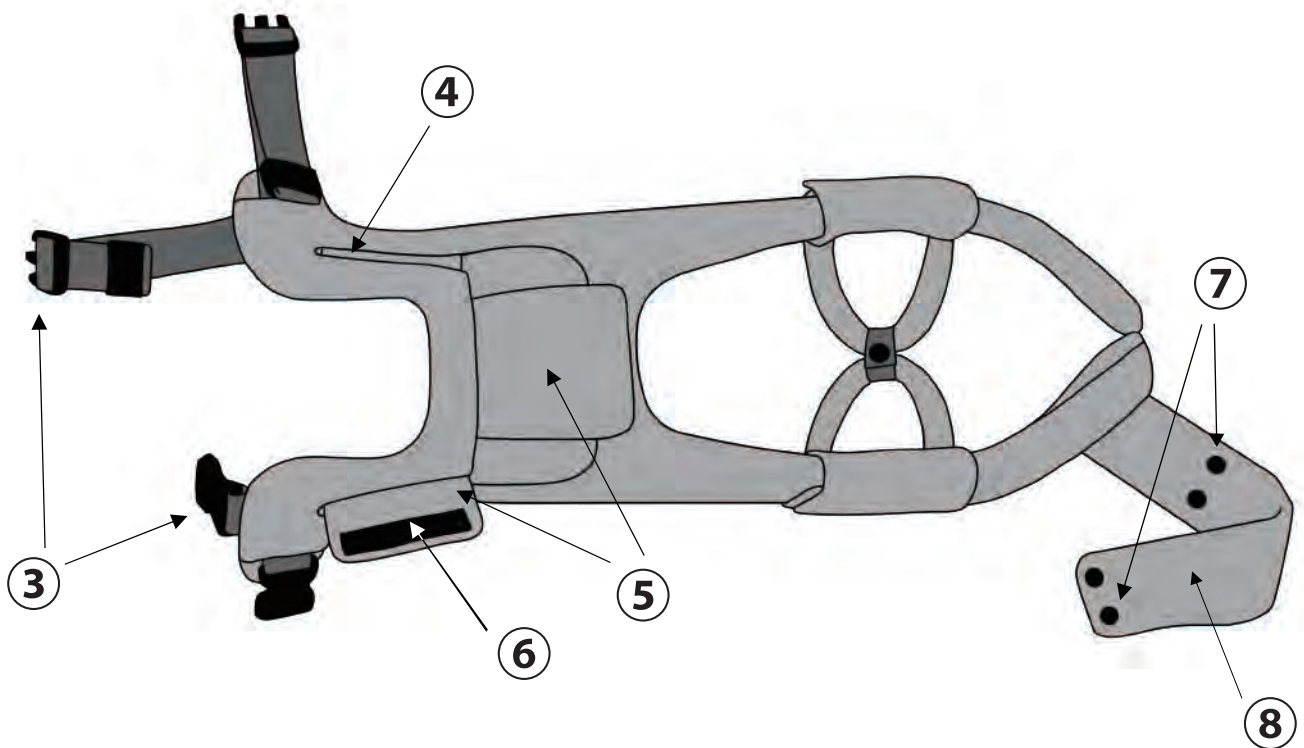


＜足保護カバー＞

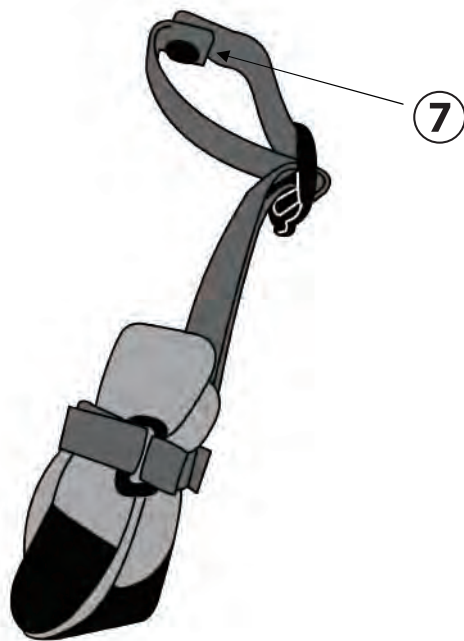

③	バックル
④	スリット
⑤	フラップ
⑥	ベルクロ
⑦	プラボタン
⑧	固定帯

ご使用の前に

警告

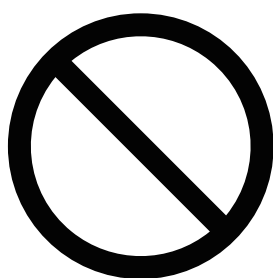

禁止

●転倒した場合に犬だけで起き上がれないため、重大な事故につながる可能性があります。使用中は愛犬をすぐに手助けできるような人が近くで見守るようにし、本品を装着した状態で犬だけで留守番させないでください。

●規定重量以上の犬を乗せないでください。また、犬以外の動物や人やモノなどを乗せて荷重をかけたりしないでください。負荷による本品の破損で愛犬または飼い主様が怪我をする恐れがあります。

●本商品を装着した状態でX線やMRIなどの診断を受けしないでください。

●本商品の不正改造、分解などはしないで下さい。事故や故障の原因になり危険です。

●傾斜面や段差、障害物がある場所や滑りやすい場所、毛足の長いカーペットなど、タイヤが引っかかりたり滑る可能性のある場所では使用しないでください。転倒やケガをする恐れがあります。

●浴室などの高温多湿の場所や浴槽内、プールやプールサイド、海、川など水中での使用はしないでください。


●本商品に故障や異常が見つかった場合は直ちに使用を中止し、販売店へ問い合わせ点検・修理をしてください。

●本商品使用時に愛犬に異常が見られた場合はすぐに使用を中止してください。

お手入れ時の注意事項


⚠ 注意

＜布地カバー＞

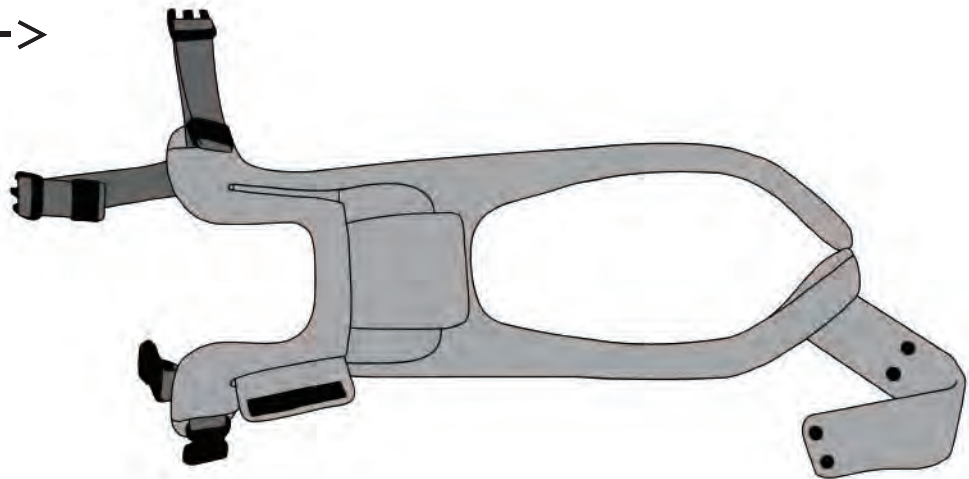

布地カバーはバックルなどの大きなプラスチックパーツがあるため手洗いしてください。

＜後ろ脚受け部＞

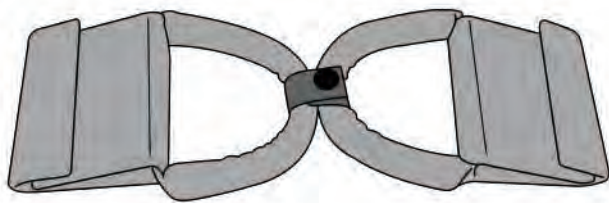

＜足保護カバー＞




後ろ脚受け部と足保護カバーは洗濯ネット等に入れて洗濯機脚での洗濯が可能です。

＜縫製品お手入れの共通事項＞

- 洗濯の際は漂白剤や漂白成分入りの洗剤は使用しないでください。
- すすぎを十分にしたら形を整えてから陰干ししてください。
- 乾燥機の使用やドライクリーニングは避けてください。

警告

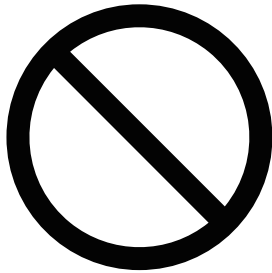

禁止

●本商品で愛犬を散歩させる場合は愛犬の歩行速度に合わせ、無理のないようにして自動車、自転車、オートバイなどで牽引しないでください。転倒などの危険があります。

注意

・愛犬の状態や症状によって本商品の使用が適さない場合があります。特に通院中や手術後である場合は獣医師や専門家に相談するようにしてください。

・長時間の着用は避け、愛犬の様子や体調を見ながら使用するようにしてください。

・愛犬に装着させる前に故障や変形、破損、タイヤのゆるみ、部品の欠落などがないかご確認ください。

・本商品を装着させる前に愛犬の状態が落ち着いていることを確認してください。
興奮状態であったり噛みつき症状がある場合は無理に乗せないでください。


・装着の際は周囲に段差、傾斜、障害物や交通事故の危険がない平らな場所かを確認してください。

・家の中や屋内で使用する場合は周りに障害物などがないか、落下すると危険な段差がないか十分に確認してください。

お手入れ時の注意事項

⚠ 注意

＜本体＞

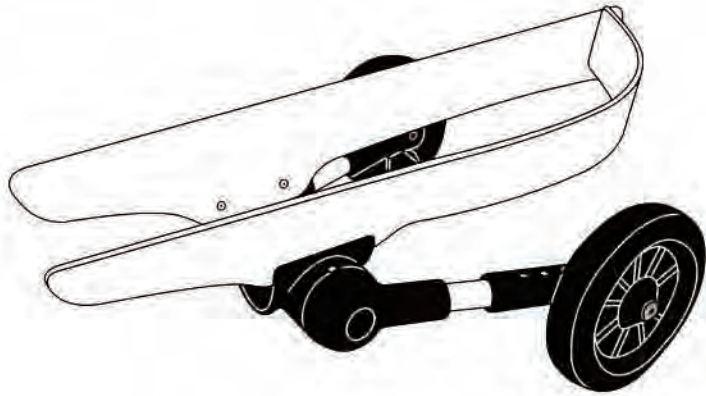

- ・ 本体は柔らかい布等で水拭きし、清潔に管理してください。
- ・ アルコール、シンナー、ベンジンなどの溶剤や、酸性・アルカリ性洗剤、研磨剤などは使用しないでください。
- ・ 潤滑油及び潤滑スプレー等を使用しないでください。
- ・ 水拭きをした後は十分に水気を取ってください。錆びや故障の原因となります。

保管時の注意事項


⚠ 注意

- ・ 高温多湿の場所や暖房器具の近くに放置しないでください。熱で変形や破損をする可能性があります。
- ・ 保管をする際は高温多湿の場所は避け、日光が直接当たらない屋内で保管してください。



ご使用前の初期調節方法①

外へお散歩へ行く前に必ず屋内（または人通りが少ない場所）にて調節を行ってから使用して下さい。

①

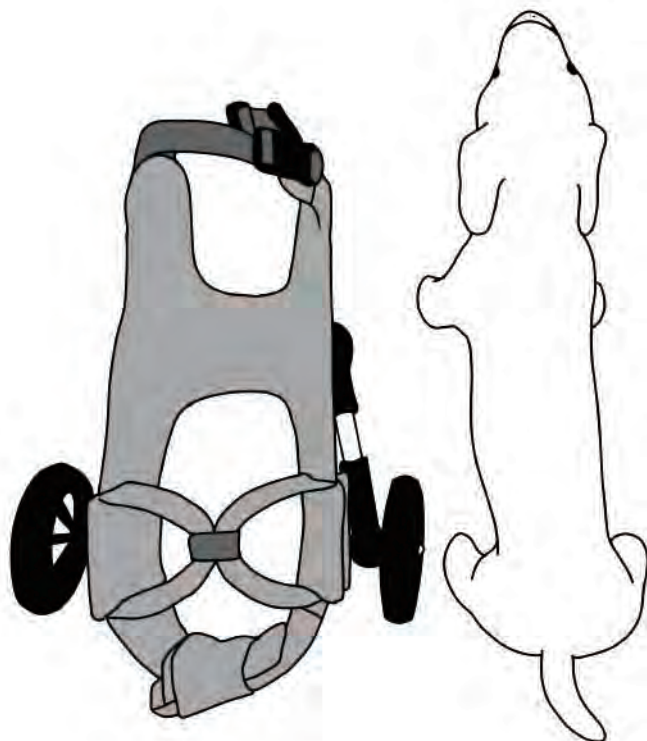


愛犬の横に本商品を並べてだいたいの体長に合うか確認して下さい。

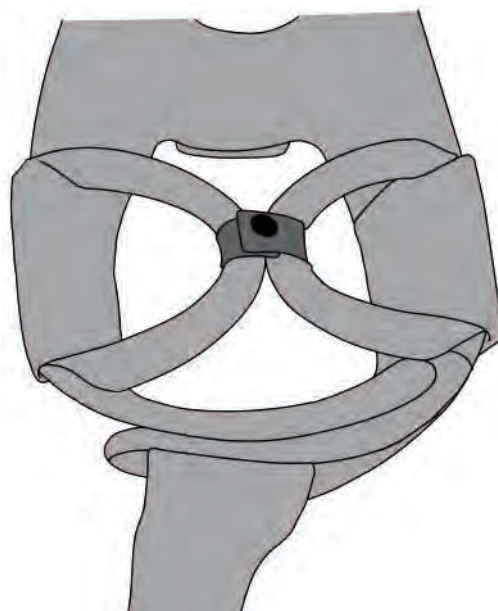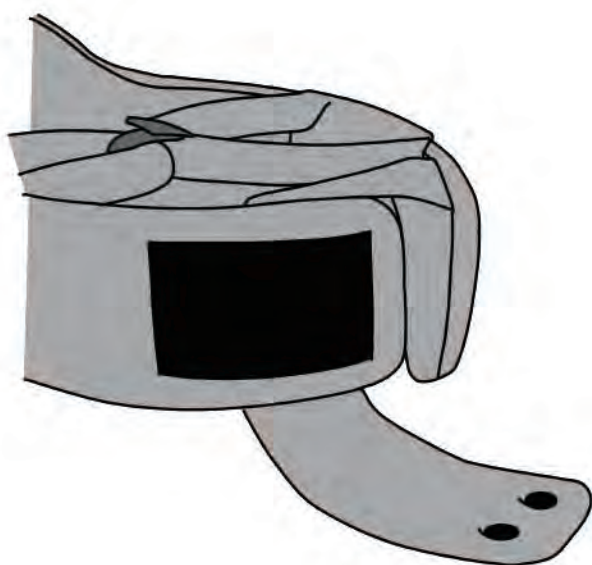

長すぎる、短すぎる場合は固定帯のプラボタンを外し、巻かれている帯をほどいたらベルクロの重なりを調整して下さい。


ご使用前の初期調節方法②・③

②

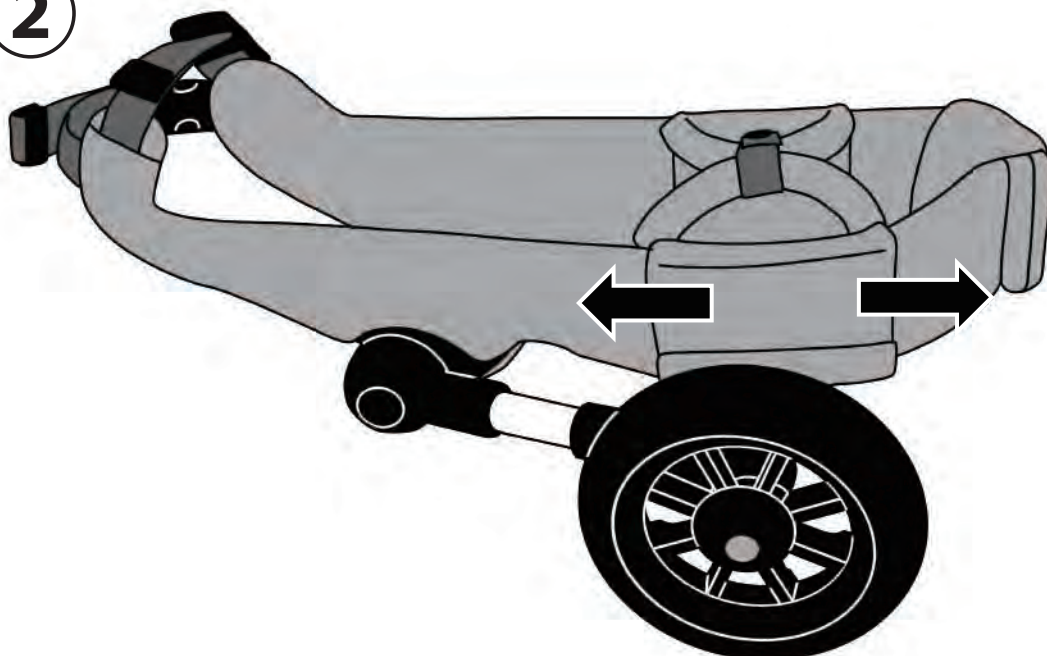

大体の長さの調整ができたなら足の位置に合うように後ろ脚受け部の位置を調整してください。

③

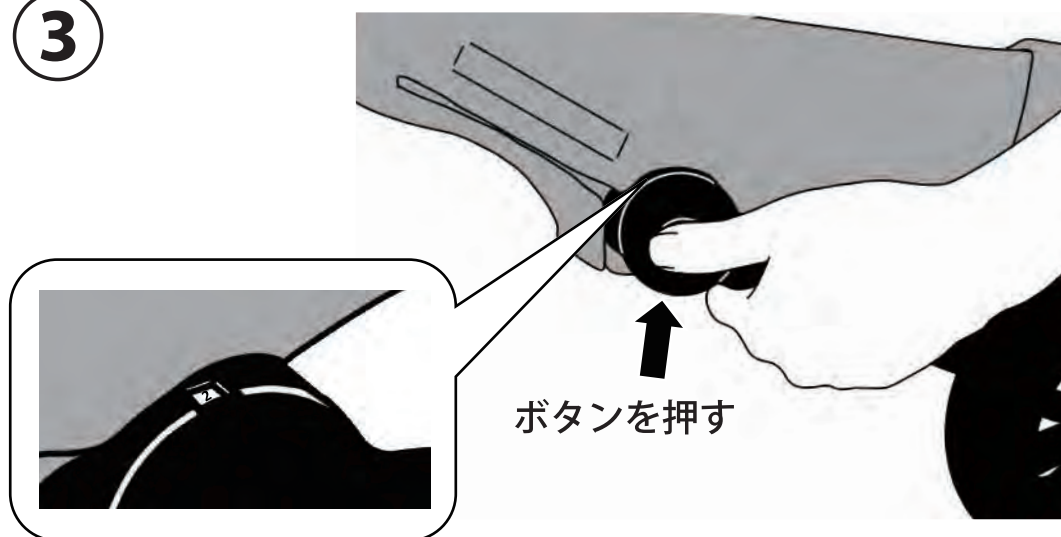


①、②がだいたい調整できたら角度調節ボタンを押しながら本体の角度調節をしてください。

参考：角度確認窓から見える数値をミニチュアダックスなら2または3
その他の犬種は3または4を初期位置にするのがおすすめです。

ご使用前の初期調節方法④

④

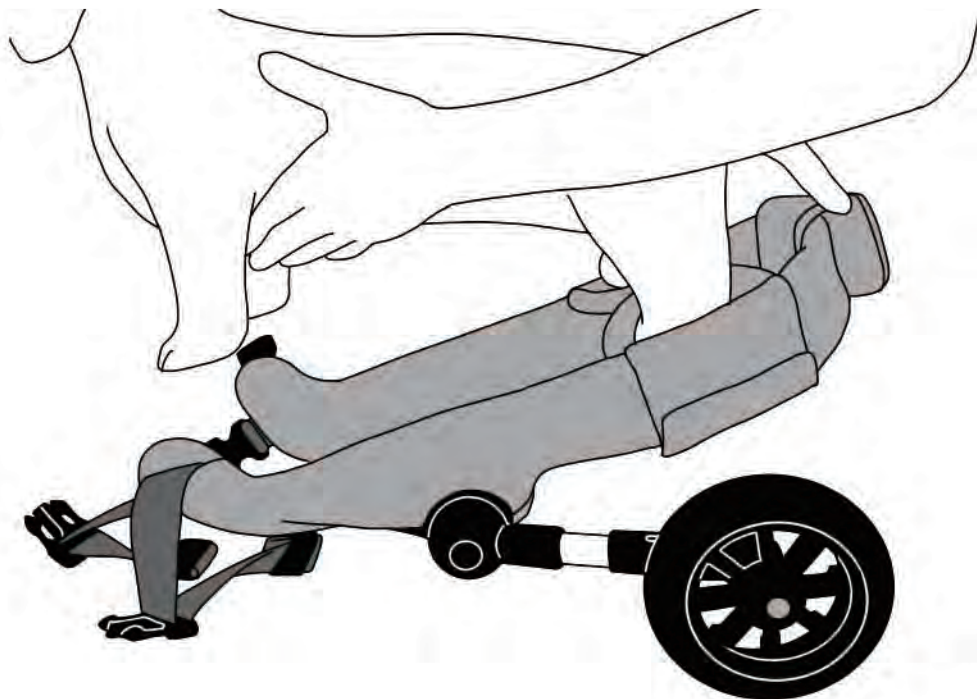


③までの調節ができたなら愛犬を一度乗せてみて、全体の長さ、足の位置、高さ、タイヤの位置が合っているか確認してください。

愛犬を乗せる時は後ろ脚から脚入れ部へ入れるようにして下さい。


ご使用前の初期調節方法⑤・⑥

⑤

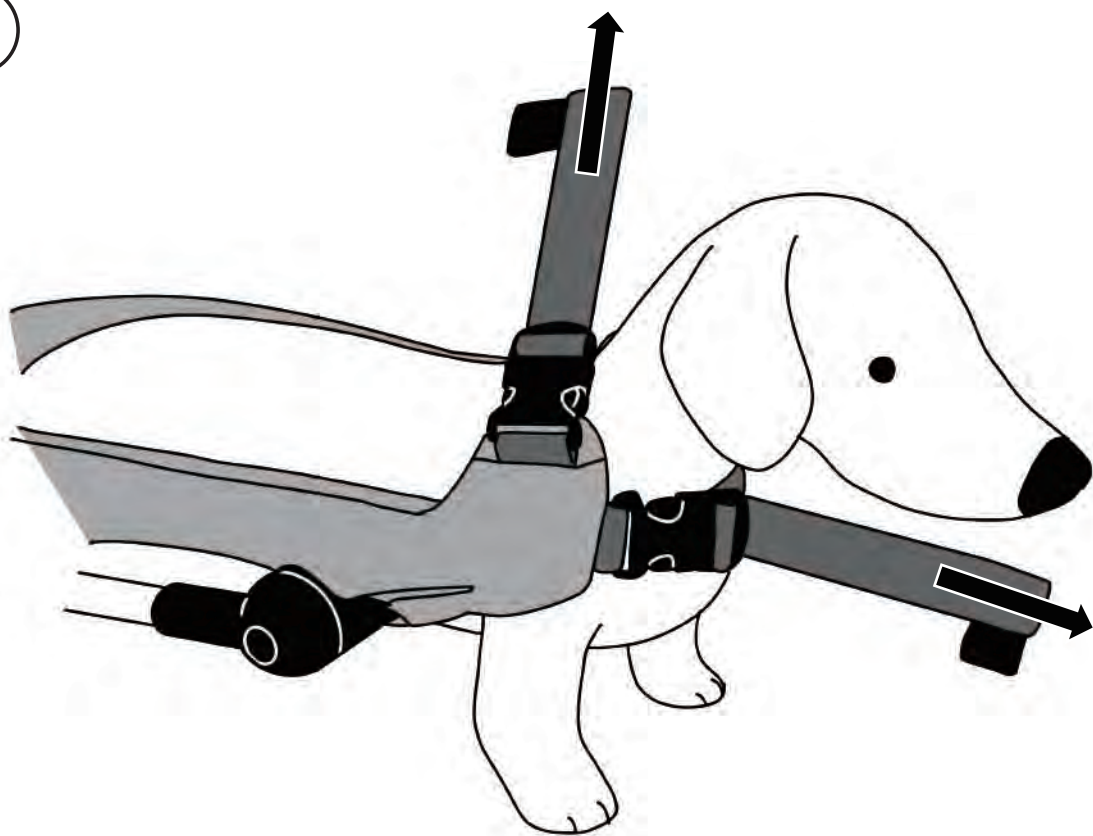

前ベルトと首ベルトの長さを調整して下さい。指1本分くらいのゆとりがある程度のキツさがベストです。


⑥

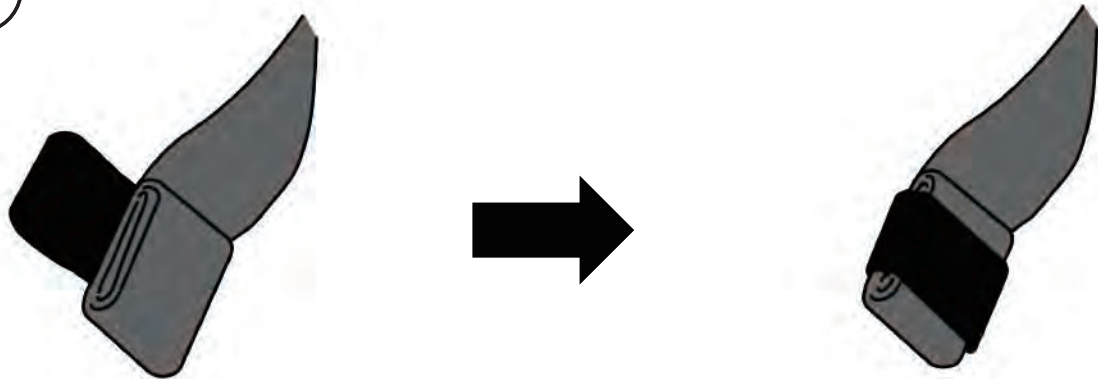


調節ができれば余ったベルトを丸め、ゴムでまとめてください。

ご使用前の初期調節方法⑦


●正しく調整できたか？確認ポイント：本体が水平になっていますか？

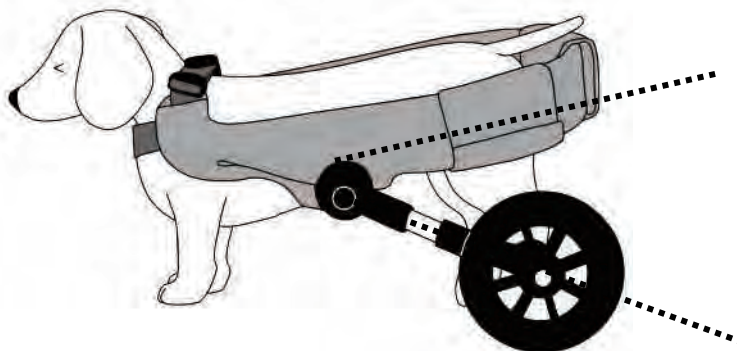

前のめりになって腰が上がっている：犬の体高に対して本体の角度がきつすぎる可能性があります。角度の数字を小さくしてみてください。

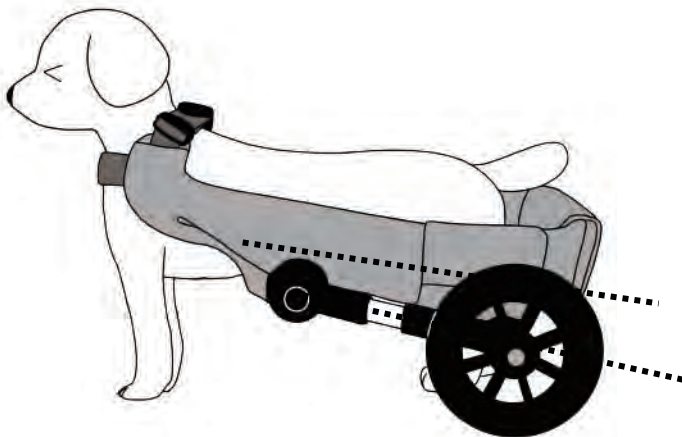


腰が落ちて足が折れ曲がっている：犬の体高に対して本体の角度がゆるすぎる可能性があります。角度の数字を大きくしてみてください。

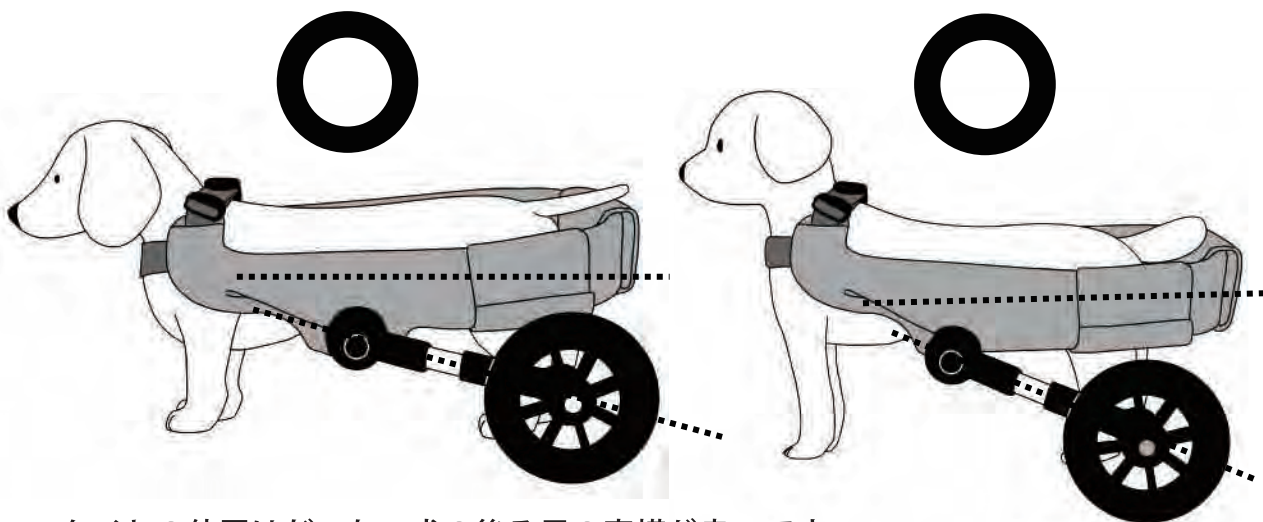

タイヤの位置はだいたい犬の後ろ足の真横が良いです。
パイプ長さ調節ボタンを押してタイヤの位置調節をしてください。

ご使用前の初期調節方法⑧

⑧

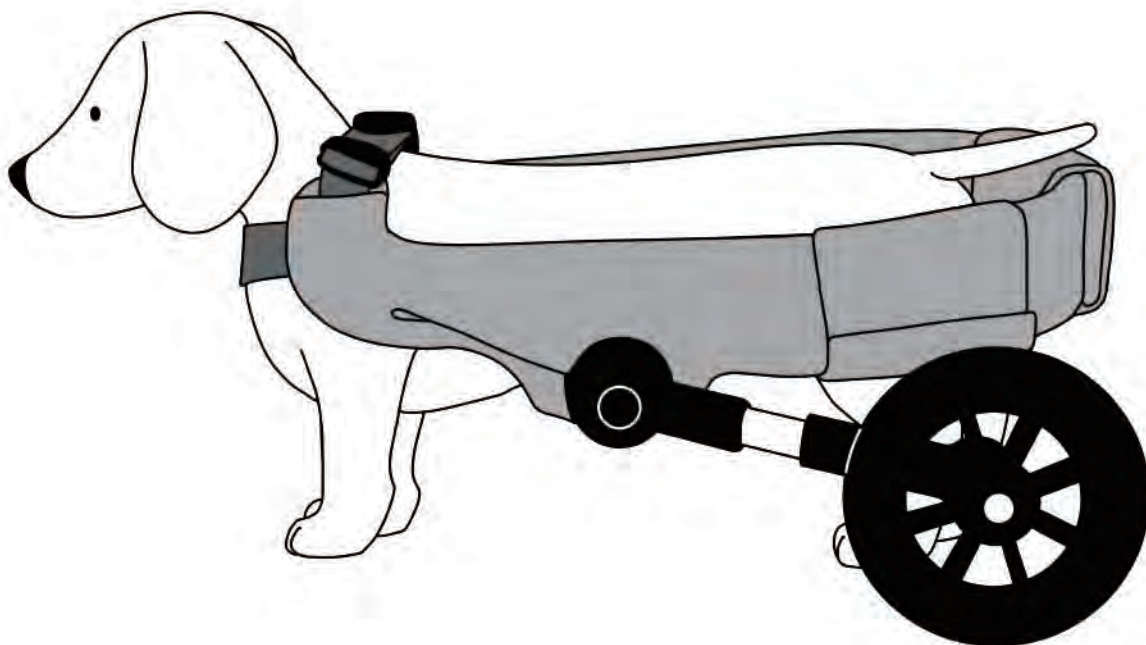


最初の準備は完了です。

愛犬がうまく歩かなかった場合は主に【ご使用前の初期調節方法①～③（特に③）】の箇所を随時調節して愛犬に合うようにしてください。合わせて【ご使用前の初期調節方法⑦】のチェック項目を参考にし、調整をしておいて下さい。

また、お散歩など本商品を装着した状態で屋外へ行く時には、リードは本商品に直接付けず、お手持ちのハーネスや首輪に付けて使用するようになしてください。


足保護カバーの使用方法①・②

①

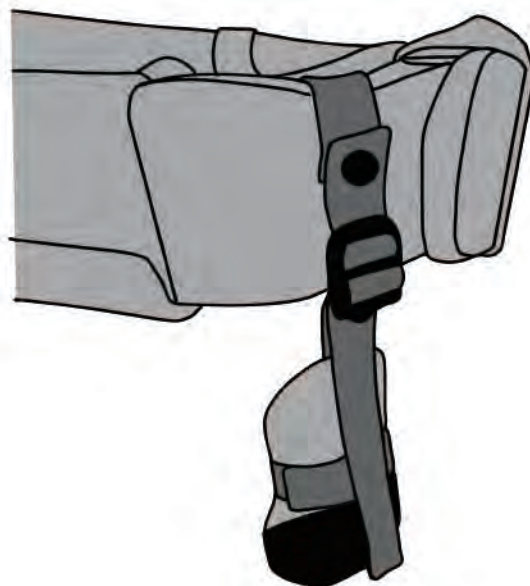

足保護カバーは本体の後方部に取り付けてください。


②

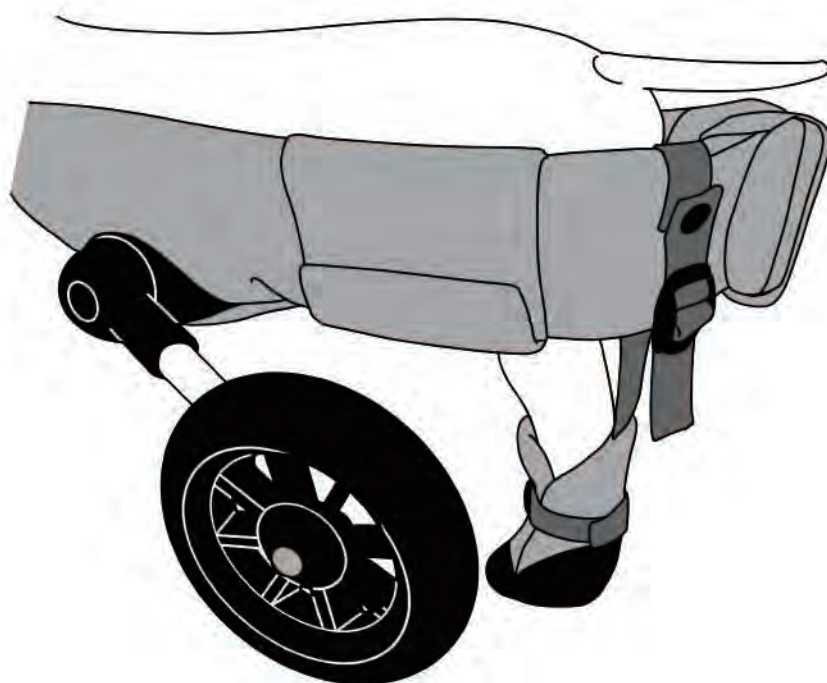

まだ足の現存能力があり、歩行トレーニング目的で使いたい場合：
足が地面に着くようにベルトの長さを調節してください。

足保護カバーの使用方法③

③

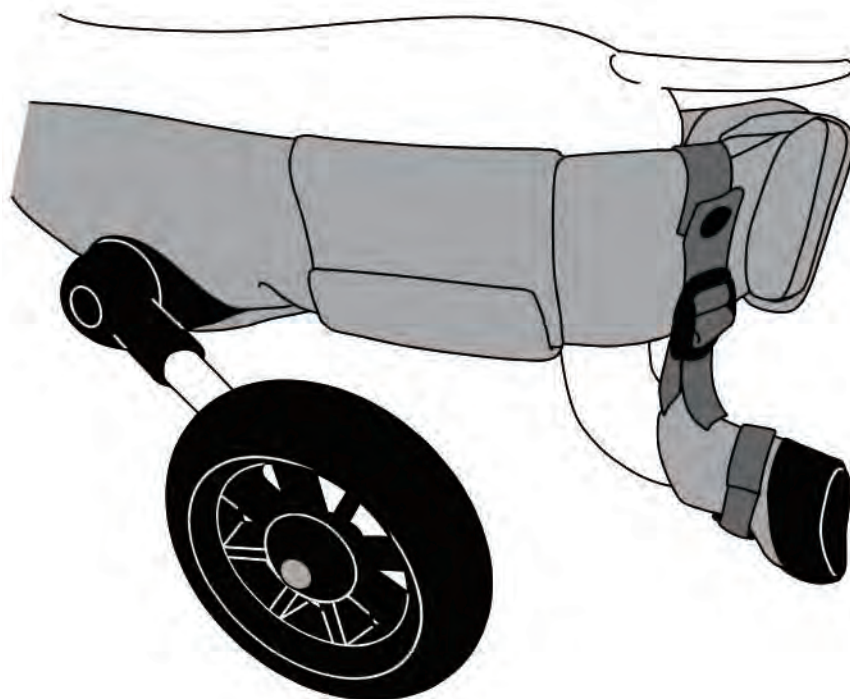

足が完全にマヒしている、または残存能力がごくわずかで足を吊った状態で使用したい：足の関節を自然に曲げた状態で地面に着かない位置にベルトを調節してください。

足保護カバーは愛犬の状態を見ながら使用してください。

足の状態が悪い場合は無理をせず吊って使用するようにしてください。

装着後の確認事項

●以下の項目は装着後、屋内外で使用する前に毎回確認するようにして下さい。

○ベルトは強く締めすぎていないか？

（人間の指一本分のゆとりがあるくらいがベストです）

○首ベルト、前ベルトのバックルやベルクロの箇所に愛犬の被毛を巻き込んでいないか？

○余ったベルトはまとめられているか？

○布地カバーから本体が抜けていたりはないか？

（フラップのベルクロがしっかり止まっているか確認してください）


○後ろ脚受け部に脚が片方づつしっかり入っているか？

○後ろ脚受け部に尻尾を挟んでいないか？


○足保護カバーのベルトの長さは愛犬に対して適切であるか？

○リードやハーネスは装着できているか？（屋外使用）

歩行トレーニングについて

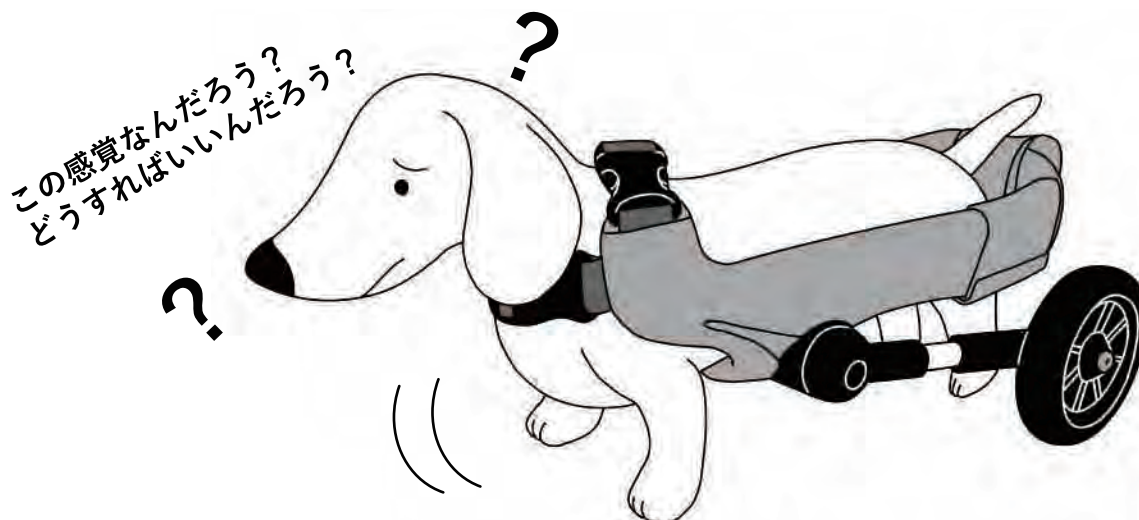

犬が初めて歩行補助具を付けた際、いつもと違う慣れない感覚に戸惑い後ろ歩き（後ずさり）してしまうことが多くあります。長く後ろ足を使っていなかった犬ほどこの動作が出る事が多いです。すぐに歩き出さなくても付けた状態の感覚に慣れるまでしばらく乗せたまま様子を見てあげてください。

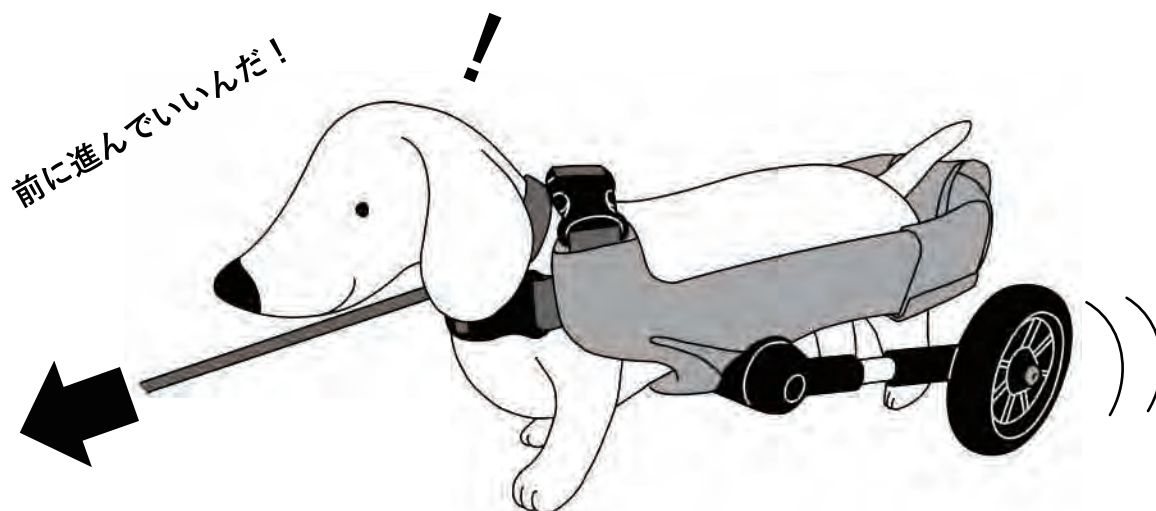

ある程度犬が落ちついてきたらリードをつけて前へ引っ張ってやり歩く方向を示してあげてください。（リードはお手持ちの首輪やハーネスに取り付けてください。）



おやつや声かけなどをして前へ進む気持ちを引き出してあげながら歩行トレーニングをしてあげてください。



本商品へは直接リードを取り付けたり巻き付けたりしないでください。本商品を外した際にノーリードになってしまうため危険です。

伏せポジションについて

愛犬が散歩中またはドッグランや公園などで休憩をとる時に伏せの姿勢をとろうとする事があると思います。
そんな時は本体のボタンを押しながらタイヤの角度を  に合わせてください。

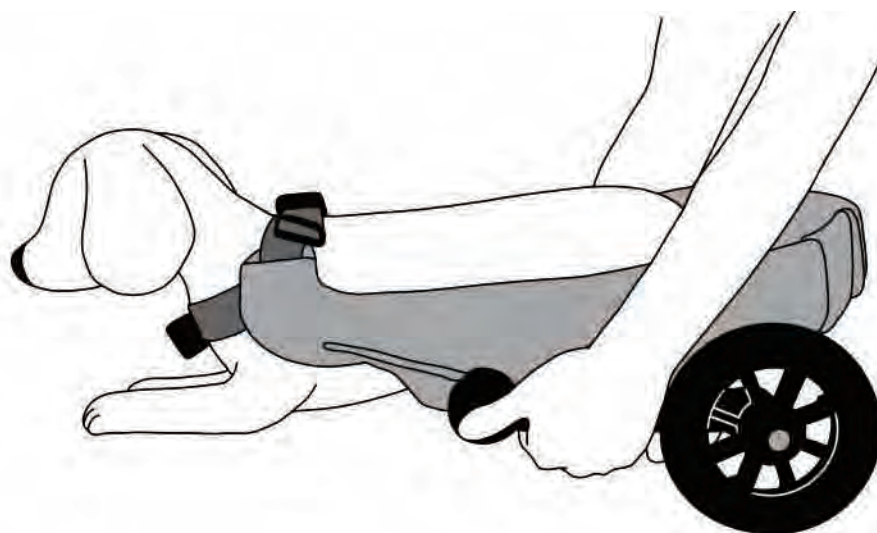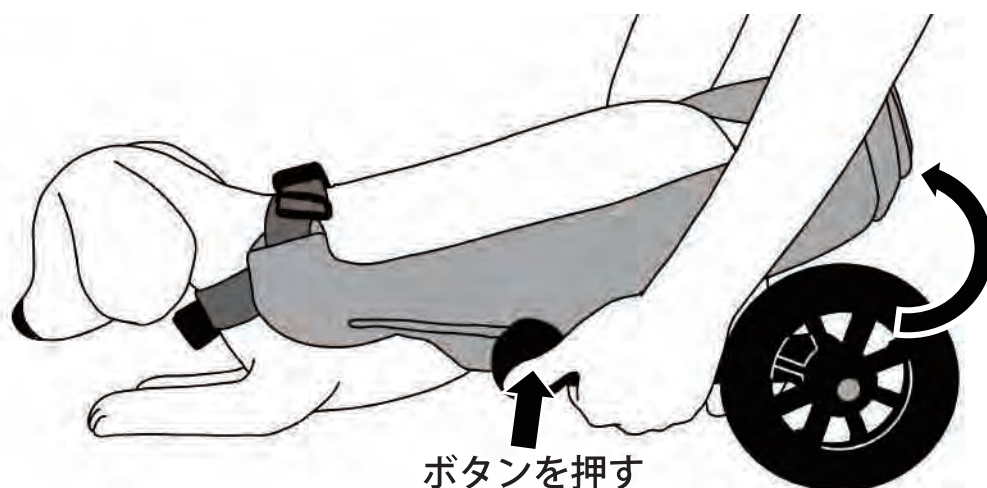

角度が  に合わさっていると、タイヤとパイプは本体に添わせる形になるため、車いすに乗った状態でもワンちゃんは楽に伏せの姿勢をとることができます。


左右のボタンは連動していないので片側ずつ角度調節するか両方のボタンを両手で押しながら動かしてください。

再び歩き出す場合は伏せさせる前の角度に左右同じになるよう合わせながら戻してください。

本体から縫製品を外す方法①・②


洗濯などをする際に本体から縫製品を外したい時の方法を解説します。

①

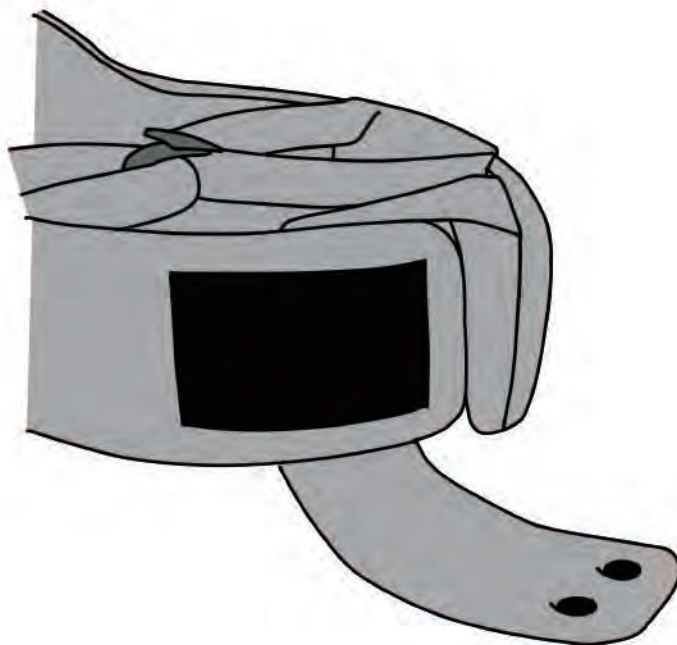

固定帯のプラボタンを外してから巻いてある帯を外し、ベルクロをはがして下さい。

②

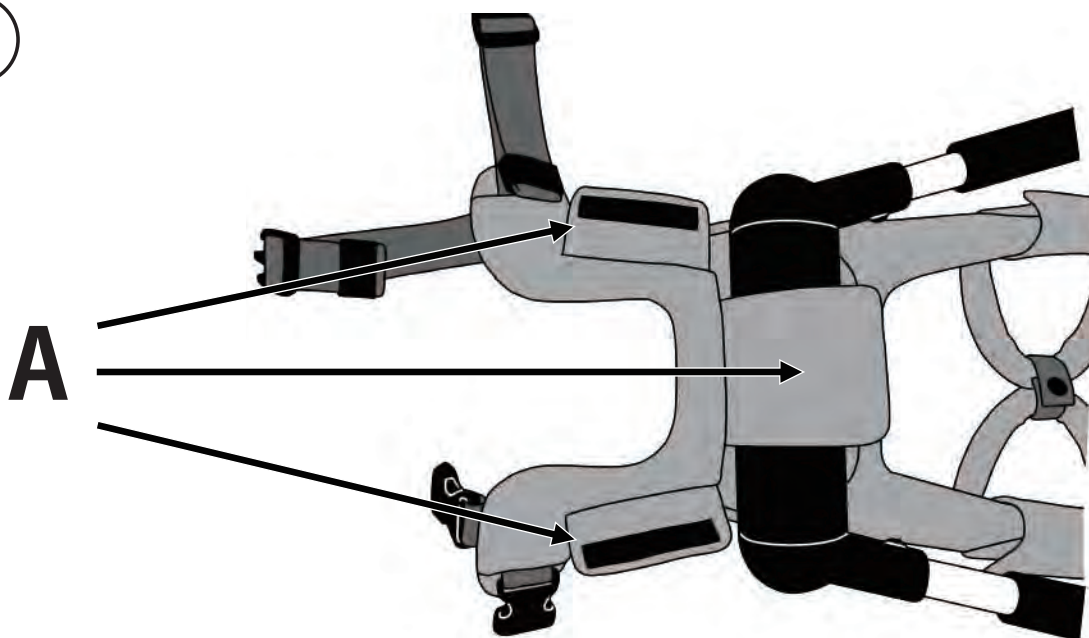



Aの3箇所のフラップのベルクロを外してください。

本体から縫製品を外す方法③

③



片方ずつスリットからサポートプレートを外へ出し、全体を引きずり出してください。

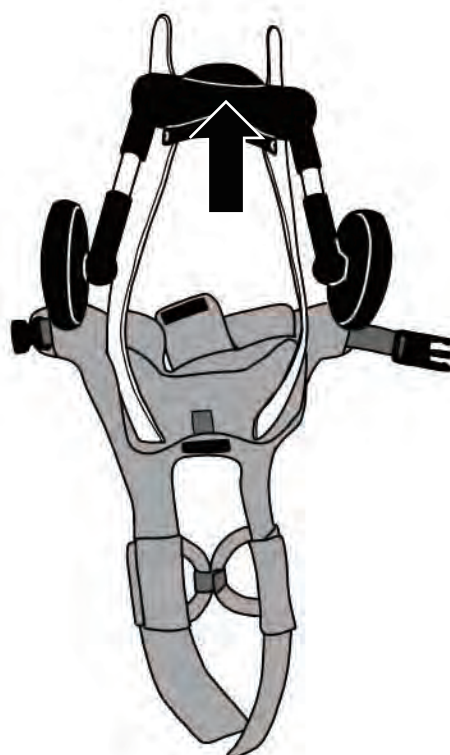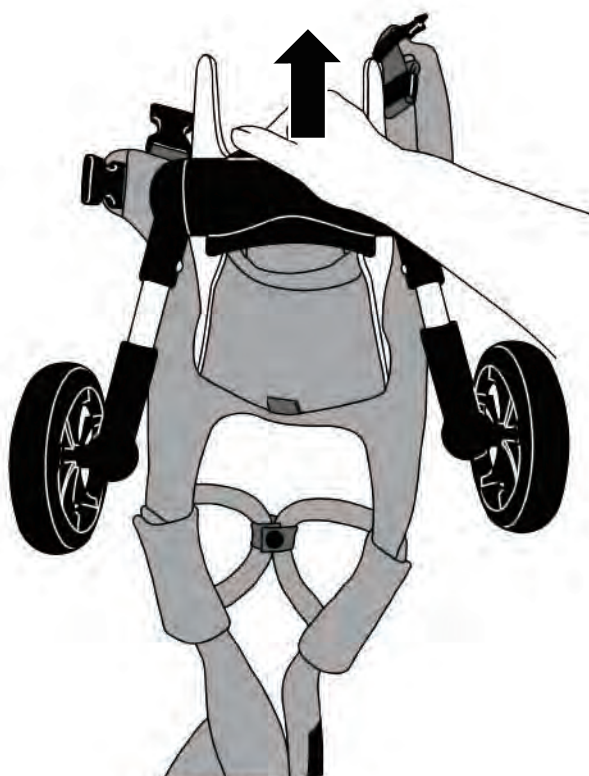


※必ず巻いてある固定帯を外してから本体を出すようにしてください。
力づくで無理に引きずり出そうとすると破損する可能性があります。
サポートプレートを出しにくい場合は後ろ脚受け部も外してから
引きずり出して下さい。

縫製品を本体へ装着する方法①・②

洗濯後などに本体へ縫製品を付けたい時の方法を解説します。


①

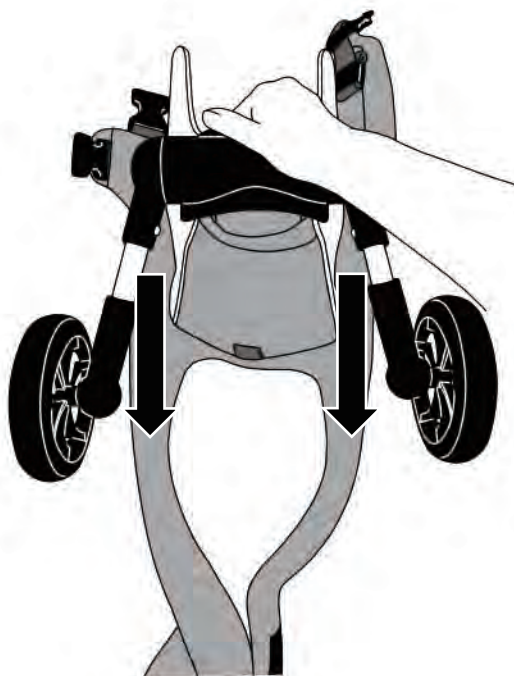

スリットの部分から左右同時に縫製品の中へサポートプレートを入れるようにしてください。

②


布地を引っ張りながら
サポートプレート
を入れるのがコツ

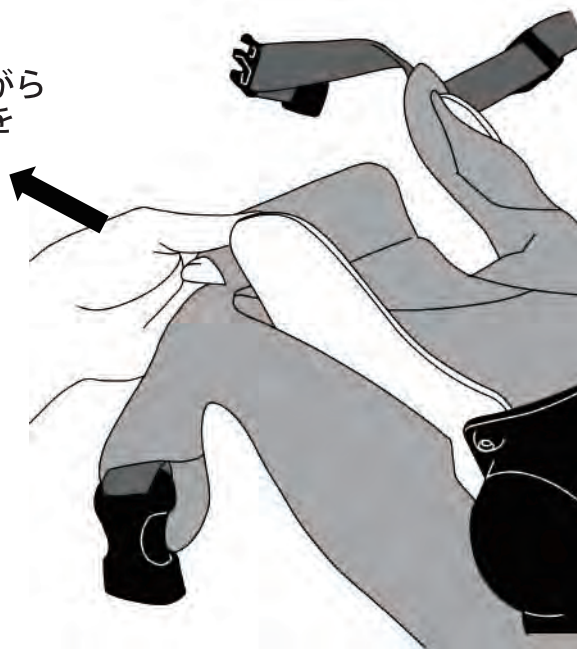

サポートプレートの前方部を片方ずつスリットへ入れ込んでください。
※サポートプレートの後方がしっかり入っていないと②の動作
をするときに入りにくいことがあります。


縫製品を本体へ装着する方法③・④

③

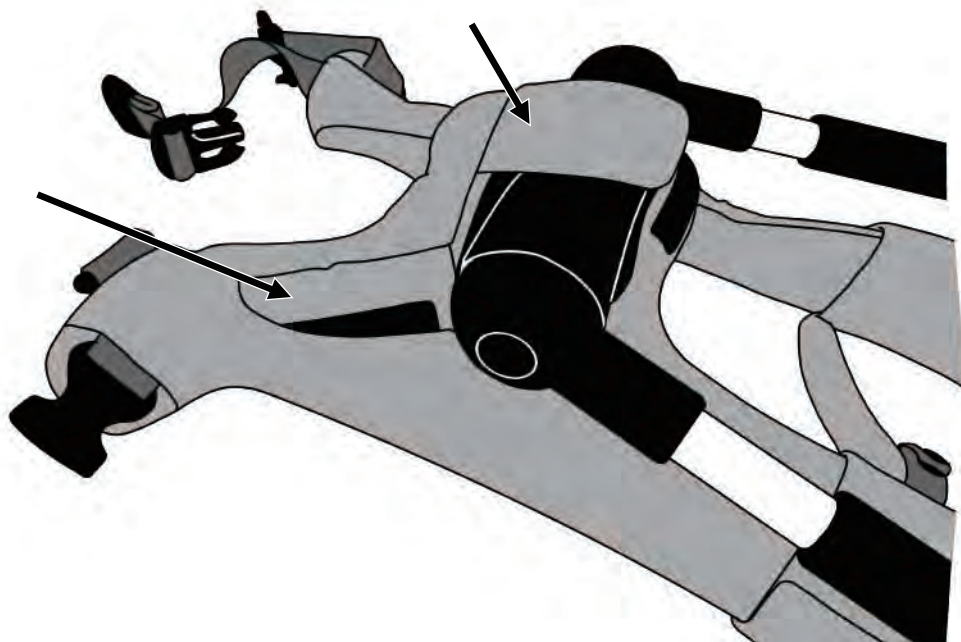

サポートプレートが両側入ったらフラップのベルクロを付けて固定して下さい。

④

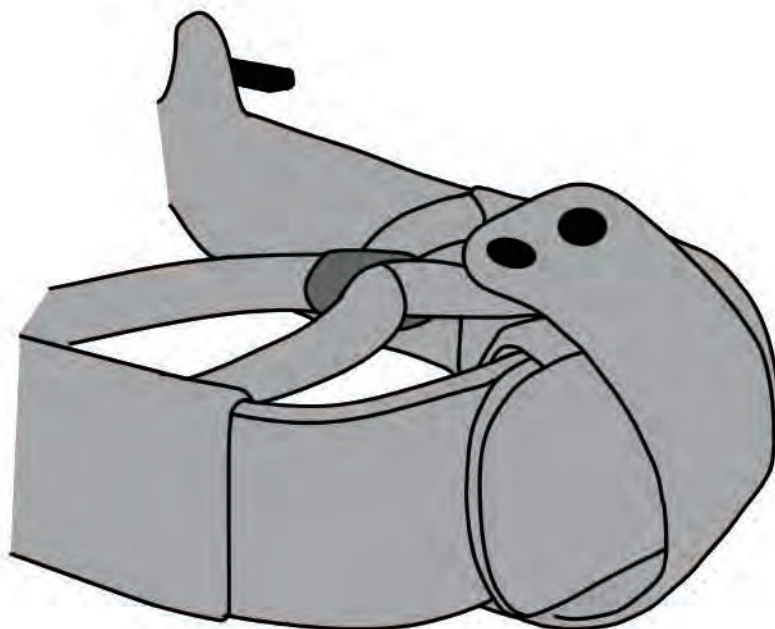

任意の位置でベルクロで固定し固定帯を巻いてプラボタンで固定してください。

故障かな？と思ったら

ご使用に際し、故障や異常をお感じになった場合は、直ちにご使用を停止し、販売店にご相談下さい。

保証規定

1.本製品が保証期間内に正常な使用状態で故障した場合に保証規定によりお買い上げより1年間の無償修理または交換対応致します。

お送りいただく際の送料は本保証規定範囲内の修理に限り往復販売店にて負担いたします。

2.次の場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

ご使用上の誤り（取扱説明書以外の誤ったご使用方法）により生じた故障
弊社または指定業者以外で修理、改造、分解等された場合、火災、天災、地変、落雷等による故障、浸水、落下、泥、砂などにより生じた故障、保管上の不備や、お手入れの不備による故障、一般家庭用以外に使用された場合の故障、および損傷、自然消耗、摩耗、劣化による故障の場合、その他合理的事由から弊社が保証期間外と判断した場合。

3.製品の使用または故障に起因する直接的及び間接的な損害につきましては保証いたしません。

ご注意

この保証規定は以上の規定により無料修理・交換をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは、販売店までお問合せください。その際の修理費用につきましてはお客様にご負担いただきます。

本保証規定は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼、および海外でご利用頂いている製品に関しては保証をお受けになれません。

修理中の代替製品のご提供は行っておりません。

本保証規定は予告無く変更する場合がございます。製品の保証は最新の保証規定の内容を適用することとさせていただきます。


免責事項

法律上の請求の原因の種類に問わずいかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる二次的損害（財産の損失、愛犬または飼い主様のお身体の障害、建物や設備・製品に対する損傷、またはその他の金銭的損害を含む）に関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。

破損した場合の注意事項

使用を重ね、劣化や破損により本商品が以下の状態になってしまった場合は使用を中止してください。

愛犬がケガをするおそれがあります。

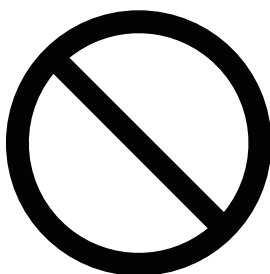

禁止

●本体サポートプレートにひび、または割れている無理やりテープ等で補修しての使用はご遠慮ください。犬の体重を支えきれず走行中に転倒する危険がございます。
本体の修理が必要です。修理依頼は27Pをご覧ください。

●前方または首ベルトのバックルが破損していて留められない

使用中に愛犬が本体から脱落をしてケガをしたり、抜け出しの危険がありますのでバックルが破損した状態で使用しないでください。

布地カバーの買い替えが必要です。

単品購入は27Pをご覧ください。

●タイヤがガタついてきた

タイヤの軸部分がすり減っている場合は交換をおすすめ致します。

タイヤユニットの単品購入は27Pをご覧ください。

各パーツの単品追加購入について

楽天市場にて各パーツ単品でのオンライン販売も行っております。

QRコードからアクセス頂き、ご購入ください。

■布地カバー

(各柄お選び頂けます)



WANCORO ショップ
楽天市場店



■タイヤユニット

(左右セット)



■足保護カバー

(両足セット)



本体の交換について

初期不良以外の本体の破損に関しては、有償にて交換を承っております。

下記 WANCORO 公式 HP の「本体の交換申込」ページよりお申し込み下さい。



◀「本体の交換申込」ページへジャンプします。

www.wancoro.online

保証書 (お客様控え)

保証対象期間		お買い上げ日より 1 年間	
お買い上げ年月日		年	月 日
製品名		WANCORO	
お客様	ご住所	〒 TEL :	
	お名前	様	
販売店			

本取扱説明書に記載されている通り、お客様の正常な使用状態において、万が一故障した場合は保証規定に基づきご交換させていただきます。

製品に関するお問い合わせ

故障、損傷、不具合、または本品についてのお取り扱い、手入れ方法のご相談につきましては、下記の販売店へお問い合わせください。

販売店

製造元

旭工業株式会社

〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-58-5
TEL : 090-8196-2696

個人情報のお取り扱い（プライバシーポリシー）につきましては、
<https://www.asahi-ind.co.jp/>のプライバシーポリシーをご参照下さい。